

# キャリブ・M

## ■特 長

- 1) 複数項目の標準液を1液として使い勝手を良くしました。
- 2) 水溶性のマルチキャリブレータです。
- 3) 使いやすい点眼瓶を使用しています。

## ■使用方法・安定性

- 1) 点眼ビンのキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けしてご使用下さい。
- 2) 保存時はしっかりと栓をして下さい。

## ■表示濃度

UN:30mg/dL, CRE:5mg/dL, Ca:10mg/dL, IP:5mg/dL, GLU:200mg/dL

## ■使用上の注意


- 1) 開栓後はコンタミや乾燥, 濃縮に注意して下さい。
- 2) 本品は酸性溶液ですので取り扱いに注意して下さい。

## ■包装・貯法・有効期間

製品コード	製品内容	包装形態	貯 法	有効期間
A209-01	キャリブ・M	5ml × 6	2~10℃	2カ年

## ■安定性(2~10℃保存)

(単位:mg/dL)

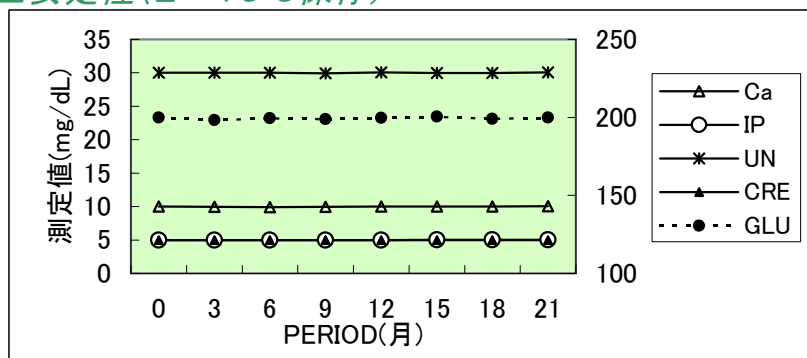

月	UN	CRE	Ca	IP	GLU
0	30.0	5.00	10.00	5.00	200.0
3	30.0	5.00	9.95	4.99	198.4
6	30.0	4.98	9.93	4.99	199.6
9	29.9	5.00	9.96	4.98	199.0
12	30.1	5.00	10.02	5.00	199.7
15	30.0	4.99	9.99	5.02	200.6
18	30.0	5.00	10.00	5.01	199.1
21	30.1	5.00	10.05	5.02	199.9



株式会社 セロテック

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143

お問い合わせ先 企画開発室 E-mail kikaku@serotec.co.jp